




Single use BOWIE & DICK type autoclave TEST PACK
Paquete de prueba desechable tipo BOWIE & DICK para autoclave
Laminated / Laminado
COMPARISON CHART
CARTA DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS

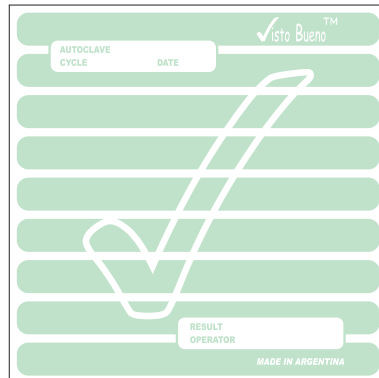


UNEXPOSED
 Light green original colour
NO EXPUESTO
 Color original verde

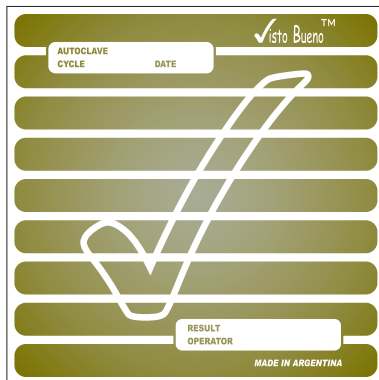


INCORRECT - LOW TEMPERATURE
 Steam penetrates the pack, but temperature is very low
INCORRECTO - BAJA TEMPERATURA
 El vapor penetra en el paquete pero su temperatura es muy baja

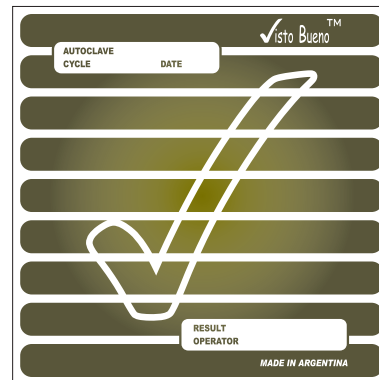

INCORRECT - POOR PENETRATION OF STEAM
 Intense colour at edges and light colour in the centre, show that steam cannot penetrate into the pack
INCORRECTO - MALA PENETRACIÓN DEL VAPOR
 Color intenso en los bordes y centro claro indica que el vapor no puede penetrar en el paquete

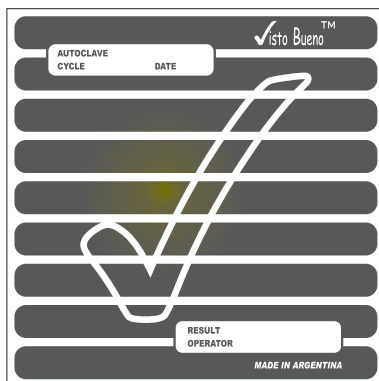

INCORRECT - POOR PENETRATION OF STEAM
 Steam penetration is almost complete, but some zones, usually in the centre, are light coloured
INCORRECTO - MALA PENETRACIÓN DEL VAPOR
 La penetración del vapor es casi completa, pero se ven zonas, generalmente en el centro, de tonalidad más clara

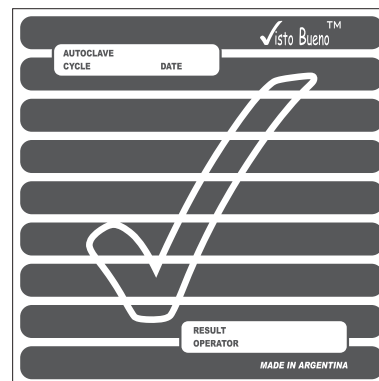

CORRECT
 Uniform dark brown-black final colour shows that sterilizer is working correctly
RESULTADO CORRECTO
 El color final marrón oscuro - negro uniforme indica un funcionamiento correcto del autoclave